

COLDISEPT

Sprej za nos



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovo medicinsko sredstvo u obliku spreja uklanja osjećaj suhoće i iritacije nosne sluznice dok štiti od štetnih vanjskih faktora.

COLDISEPT sprej za nos vlaži i umiruje nosnu sluznicu, podržavajući njenu regeneraciju i uklanjajući osjećaj peckanja.

Proizvod sadrži nanočestice srebra koje ograničavaju rast bakterija. Proizvod stvara sloj gela koji štiti od bakterija i virusa i podržava regeneraciju sluznice.

Svojstva pripravka rezultat su djelovanja mineralnih soli i biljnih ekstrakata.

SASTAV

Pročišćena voda, nanokoloidno srebro, ekstrakt *Chondrus crispus* (karagena), sorbitol, glicerol, mineralne soli (kalijum dihidrogenfosfat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, kalcijum hlorid heksahidrat, magnezijum hlorid heksahidrat), natrijum benzoat, limunska kiselina.

INDIKACIJE

Koristite u svim slučajevima suhoće i iritacije nosnog prolaza, bez obzira na uzrok.

Posebno se koristi u slučajevima:

- atrofičnog rinitisa;
- infektivnog ili alergijskog rinitisa;
- upotrebe lijekova koji oštećuju epitel nosne sluznice;
- sinusitisa;
- zagađenja vazduha ili prašine;
- ekstremne temperature;
- kod starijih pacijenata;
- suhoće uzrokovane centralnim grijanjem ili klimatizacijom;
- pušenja.

NEŽELJENA DJELOVANJA

Neželjena djelovanja COLDISEPT spreja za nos nisu poznata, međutim, kod posebno osjetljivih osoba, alergijski simptomi se ne mogu isključiti. Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite koristiti proizvod.

DODATNE INFORMACIJE I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.

Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na metalno srebro.

Spriječite slučajni kontakt s očima.

Prestanite koristiti proizvod u slučaju bilo kakvih alarmantnih simptoma.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe!

U slučaju onečišćenja, uklonite aplikator, operite ga i prokuhajte ili temeljito isperite kipućom vodom.

Trudnice i djeca mlađa od 6 godina mogu koristiti proizvod samo pod medicinskim nadzorom.

Proizvod se može koristiti duži vremenski period bez rizika od ovisnost, neželjenih djelovanja ili komplikacija.

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s uređajem trebao bi biti prijavljen proizvođaču/zastupništvu u BiH i ljekaru ili farmaceutu.

UPOTREBA I DOZIRANJE

Koristite proizvod 3-4 puta dnevno, u skladu s individualnim potrebama.

Pritisnite dozator nekoliko puta prije prve upotrebe.

Postavite aplikator u nosnu šupljinu.

Nanesite 1-2 doze u svaku nosnicu.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, na suhom mjestu, van domašaja djece.

Pakovanje 20 ml

Značenje simbola:

	Broj serije
	Upotrijebiti do:
	Konsultujte uputstvo za upotrebu
	Datum proizvodnje
	Proizvođač
	Temperaturni limit



Proizvođač/ mjesto proizvodnje:
ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, Poljska



Proizvođač u EU:
Alpen Pharma AG,
Bern, Switzerland

